



ALCOSAFE
CHILE



PRODUCTOS **Premier** BIOTECH

Alcosafe Chile es el representante oficial de Premier Biotech en Chile, llevando excelencia en pruebas de drogas a este mercado.

www.alcosafe.cl

ORALTOX



OralTox de Premier Biotech es una prueba rápida de fluidos orales que detecta hasta 12 drogas (dependiendo de su configuración). Proporciona resultados precisos en diversos entornos, incluyendo laboratorios, centros médicos, aplicaciones policiales y laborales.

Certificado por la FDA para pruebas de drogas en saliva.




UNA APLICACIÓN MÓVIL DE
INFORMES Y DETECCIÓN DE
DROGAS



RECOLECCIÓN DE MUESTRA:

Haga que el donante barra o recorra el interior de la boca (mejillas, encías y lengua) y luego sostenga el hisopo en la boca hasta que aparezca el color en la ventana indicadora de la tira (rojo). Es importante no morder, chupar o masticar la esponja. Si después de 7 minutos el indicador de saturación no ha cambiado de color, deseche el dispositivo y repita la prueba.

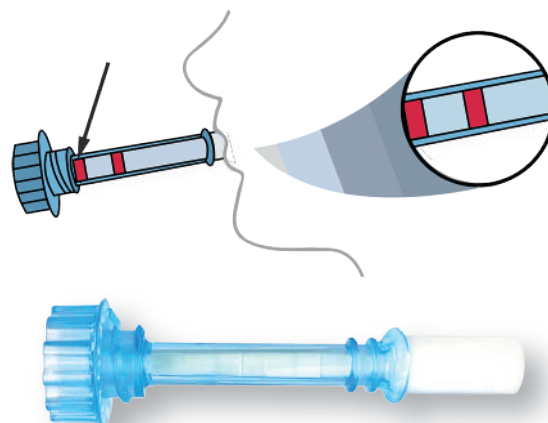

ORALTOX



Con el dispositivo de prueba colocado en posición vertical sobre una **SUPERFICIE PLANA** (el dispositivo de prueba permanece en esta posición hasta que se interpreten los resultados), el donante se quita el hisopo de recolección de la boca y se lo entrega al administrador.

El administrador inserta el hisopo de recolección en la esponja del dispositivo primero, empujando y girando hacia abajo hasta que el mango roscado se trabe en su lugar.



Detección	5 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / AMP / OPI / MET
Requisito Operación	Inmediato o Diferido
Almacenamiento	Período Prolongado
Sellado	Hermético

NEGATIVO: Una banda en C y T indica resultado negativo.

POSITIVO: Solo una banda en C, sin banda en T, es positivo.

INVÁLIDO: Si no hay banda en C, repita con una nueva prueba.

Sustancias	Sigla	Nivel de Corte ng/ml	Tiempo de detección	
			Mínimo	Máximo
COCAÍNA	COC	20	Menos de 1 Hora	1 a 2 Días
MARIHUANA	THC	40	Menos de 1 Hora	14 Horas
ANFETAMINAS	AMP	50	Menos de 1 Hora	1 a 3 Días
OPIÁCEOS	OPI	40	Menos de 1 Hora	1 a 2 Días
METANFETAMINAS	MET	50	1 a 2 Horas	1 a 3 Días

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

NEGATIVO C T

POSITIVO C T

INVÁLIDO C T

BIO CUP



El Test Multidrogas Premier Bio-Cup es una opción preliminar para la detección de drogas y alcohol en muestras de orina. Para obtener resultados cuantitativos o confirmar positivos, se sugiere realizar un segundo método en laboratorio con la misma muestra de orina. LC-MS/MS y GC/MS son métodos de confirmación confiables para garantizar precisión.



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

El Premier Bio-Cup incluye pruebas de validez de la muestra (SVT) para determinar la integridad de la orina. Compare los colores en las almohadillas de reactivo con la carta de colores entre 1-3 minutos. Los colores fuera del rango normal son anormales.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Detección simultánea de múltiples drogas.
- Paneles relevantes para diversas sustancias.
- Personalización según necesidades.
- Configuraciones CLIA-Waived disponibles.
- Límites de detección precisos.
- Manufactura de alta calidad.
- Ampliamente utilizado y probado.
- Estabilidad de la tira de prueba por 60 minutos.
- Resultados altamente precisos y sensibles.
- Confirmación de laboratorio respalda los resultados.
- Resultados rápidos en minutos.
- Indicador de tapa para evitar derrames.
- Paneles anónimos para privacidad.

TEST	ANORMAL (BAJO)	NORMAL	ANORMAL (ALTO)
Peso específico(S)	1.000	1.005, 1.015, 1.025	>1.035
pH(P)	2.0, 3.0	4.0, 7.0, 9.0	10.0
Oxidante(O)		NEGATIVO	POSITIVO
Creatinina(C)	0mg/dl, 10mg/dl	20mg/dl, 50mg/dl, 100mg/dl	
Nitrito(N)		0mg/dl, 5mg/dl	15mg/dl, 50mg/dl
Glutaraldehído(G)		NEGATIVO	POSITIVO

BIO CUP




Recomendación Importante

Evite exponer el Premier Bio-Cup a la luz solar directa o a la humedad, ya que esto puede afectar la precisión de los resultados. Asegúrese de mantenerlo en un lugar fresco y seco hasta su uso.




ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

- El Premier Bio-Cup debe almacenarse a temperatura ambiente (15 - 30°C / 59 - 86° F).
- Inspeccione cuidadosamente el envase de aluminio para asegurarse de que no haya desgarros, cortes o daños.
- Verifique el número de lote y la fecha de vencimiento. NO utilice el producto si ha pasado la fecha de caducidad.

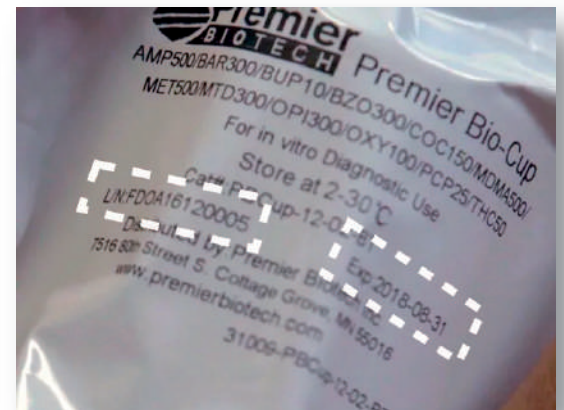

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

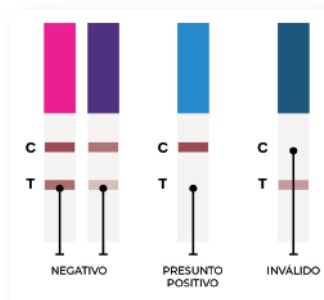

NEGATIVO: Una banda en C y T indica resultado negativo.



POSITIVO: Solo una banda en C, sin banda en T, es positivo.

INVÁLIDO: Si no hay banda en C, repita con una nueva prueba.

O-SWAB



El O-Swab® es un dispositivo innovador para pruebas de drogas en saliva diseñado para el lugar de trabajo. Puede probar hasta 16 drogas a la vez, proporcionando resultados rápidos y fáciles de leer. Su recolección es mínimamente invasiva, lo que evita manipulaciones y trampas en las pruebas. Además, no se requieren baños controlados ni privados, lo que ahorra personal y mejora la comodidad de los donantes.

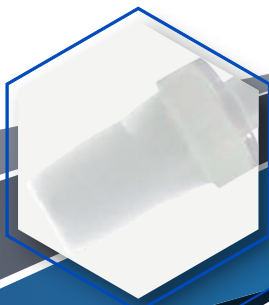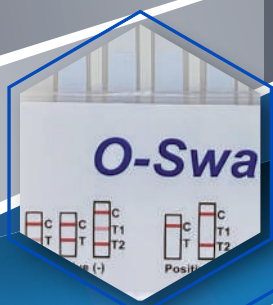

O-SWAB DETECTA 16 DROGAS DE FORMA INSTANTÁNEA Y SIMULTÁNEA, AHORRA TIEMPO Y RECURSOS EN PRUEBAS DE DROGAS.


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Pruebas rápidas:** Primero, obtén resultados para 16 drogas de abuso en minutos.
- **Paneles de prueba personalizables:** Segundo, elije las drogas específicas que deseas probar.
- **Procedimiento de recolección mínimamente invasivo:** Luego, recolecta muestras de fluido oral con facilidad y comodidad.
- **Colecciones observadas al 100%:** Por otra parte, reduce la probabilidad de manipulación o trampa en la prueba.
- **Resultados claros y fáciles de leer:** Asimismo, interpreta los resultados rápidamente y con precisión.
- **Indicador de saturación:** Asegura una recolección adecuada de la muestra en cada ocasión.
- **Tecnología innovadora:** Por último, Premier Biotech está continuamente mejorando y actualizando sus productos para cumplir con nuevas características de rendimiento y condiciones del mercado.

O-SWAB



El O-Swab® es un dispositivo innovador para pruebas de drogas en saliva diseñado para el lugar de trabajo. Puede probar hasta 16 drogas a la vez, proporcionando resultados rápidos y fáciles de leer. Su recolección es mínimamente invasiva, lo que evita manipulaciones y trampas en las pruebas. Además, no se requieren baños controlados ni privados, lo que ahorra personal y mejora la comodidad de los donantes.

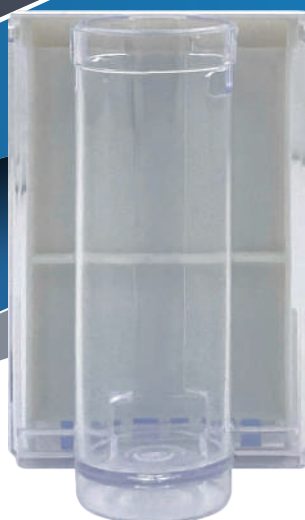

INTERPRETACIÓN GRÁFICA



DROGAS Y NIVELES DE CORTE

SUSTANCIAS	NIVELES DE CORTE	SUSTANCIAS	NIVELES DE CORTE
Anfetaminas (AMP)	25-50 ng/ml	Metanfetaminas (MET)	25-50 ng/ml
Barbitúricos (BAR)	50 ng/ml	Metadona (MTD)	30 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	10-20-30 ng/ml	Opiáceos (OPI)	25-40-50 ng/ml
Buprenorfina (BUP)	5 ng/ml	Oxicodona (OXY)	20 ng/ml
Cocaína (COC)	15-20-50 ng/ml	Fenciclidina (PCP)	3-10 ng/ml
Cotina (COT)	30-50 ng/ml	Propoxifeno (PPX)	30-50 ng/ml
Fentanilo (FYL)	10 ng/ml	Marihuana (THC)	12-30-50 ng/ml
Ketamina (KET)	30-50 ng/ml	Tramadol (TML)	30-50 ng/ml
Éxtasis (MDMA)	40-50 ng/ml	Alcohol (ALC)	0.02%


BIO DIP



Premier Bio-Dip es una solución precisa y rápida para la detección preliminar de múltiples drogas en orina. Proporciona resultados en 60 minutos, garantizando fiabilidad y eficacia en su uso. Es una herramienta esencial para la detección simultánea de varios medicamentos, proporcionando tranquilidad y confianza en los resultados.



» BIO DIP ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR MÚLTIPLES DROGAS EN UN SOLA TIRA.

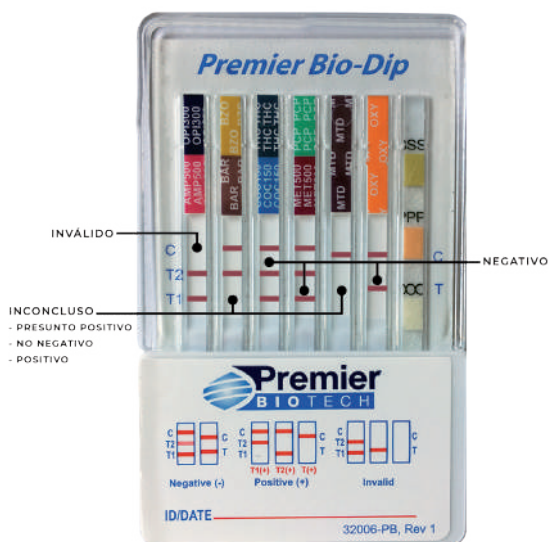

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Detección simultánea de múltiples drogas en orina.
- Tiras reactivas de drogas exentas de CLIA disponibles para su comodidad.
- Diseño hermético y resistente al agua para una mayor durabilidad.
- Resultados estables durante 60 minutos, incluso bajo inmersión.
- Entrega de resultados rápidos para una toma de decisiones ágil.
- Opciones de tiras individuales especializadas.
- Producido con tecnología automatizada y montaje semiautomático para máxima precisión.
- Comprobada precisión, sensibilidad y especificidad.
- Capacidad para evaluar diversas drogas de abuso, incluyendo K2/Spice, Tramadol, Fentanilo y Alcohol.
- Niveles de corte ajustables para adaptarse a sus necesidades específicas.

BIO DIP




Resultados Premier Bio-Dip: Dos líneas visibles indican un resultado negativo, independientemente de la intensidad, color o grosor. Resultados no concluyentes se presentan con la línea de control superior y falta de la línea de prueba inferior; lea después de 5 minutos para precisión. Siga indicaciones y tiempos recomendados.



Estructura de la Tira Multidroga: Test de Droga Premier Bio-dip

- En la parte superior, encontrará la línea de control etiquetada como (C). Esta línea es esencial para validar que la prueba se ha realizado correctamente.
- A continuación, encontrará dos regiones de prueba etiquetadas como (T1) y (T2). Cada una de estas regiones representa diferentes tiras reactivas de drogas:

» INTERPRETACIÓN GRÁFICA

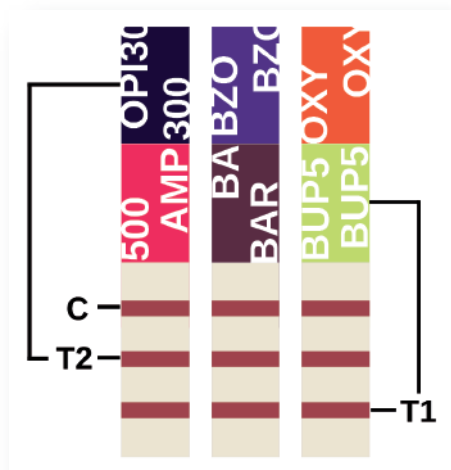

1.- Región (T1): Las líneas de prueba en esta región detectan:

- AMP (Anfetaminas)
- BAR (Barbitúricos)
- BUP (Buprenorfina)


2.- Región (T2): Las líneas de prueba en esta sección detectan:

- OPI (Opiáceos)
- BZO (Benzodiazepinas)
- OXY (Oxicodona)

BIO DIP - ALC



El test de alcohol en orina de Premier Biotech se emplea para detectar la presencia de alcohol en muestras de orina y proporciona una estimación de su concentración en la sangre. También, está diseñado exclusivamente para uso forense, este test rápido determina niveles de alcohol en la sangre iguales o superiores al 0.02%.

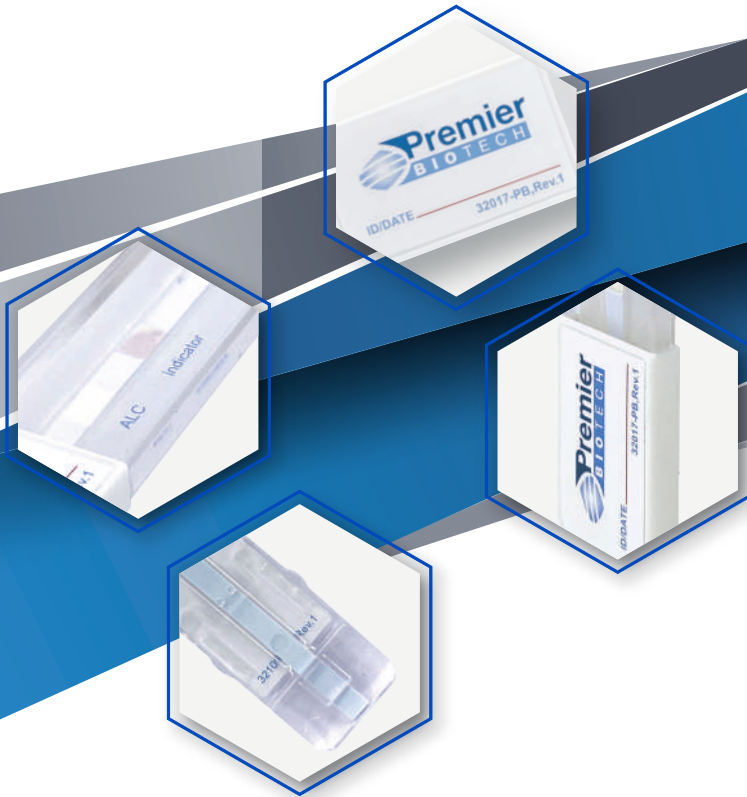

- El alcohol lidera las causas de mortalidad en América del Norte en el rango de 15 a 45 años.
- La tira reactiva Premier Bio-Dip para alcohol cambia de color al detectar alcohol en muestras de orina, permitiendo una medición semicuantitativa comparándola con una tabla de colores.
- Contiene alcohol oxidasa y peroxidasa que proporcionan una evaluación precisa.
- Detectar alcohol en orina es un indicador indirecto confiable de su presencia en sangre, especialmente cuando es difícil obtener muestras de sangre.
- Las pruebas en orina son menos invasivas y prácticas en entornos forenses o de detección de consumo de alcohol.

BIO DIP - ALC


» Detecta y estima la concentración de alcohol en sangre, especialmente en contextos forenses, con niveles a partir del 0.02%.







Alcosafe Chile es el representante oficial de Premier Biotech en Chile,
llevando excelencia en pruebas de drogas a este mercado.



 Santa María 2474 - Providencia, Santiago

 ventas@alcosafe.cl

 600 656 0079 - +56 9 2165 2520

www.alcosafe.cl

