

TEST DE SALUD FEMENINA TEST FSH MENOPAUSIA FORMATO LÁPIZ EN ORINA

El test rápido de FSH Menopausia en orina es un **dispositivo de autoanálisis diseñado para detectar la hormona foliculoestimulante (FSH) en muestras de orina**, permitiendo a las mujeres monitorear su estado hormonal y detectar la menopausia en casa.

Con una precisión del 100% y reactivos avanzados, ofrece resultados confiables y rápidos, indicando niveles elevados de FSH que pueden sugerir perimenopausia. Esta herramienta fácil de usar garantiza privacidad y conveniencia en el monitoreo hormonal.

PRECAUCIONES

- Leer detenidamente y seguir las instrucciones proporcionadas en el prospecto para garantizar la fiabilidad de los resultados.
- Conservar la prueba en su empaque sellado en un lugar seco a temperatura ambiente (2-30 °C) y verificar la fecha de caducidad antes de usarla.
- Utilizar la prueba solo una vez para mantener la precisión de los resultados.
- Recolectar la muestra en un recipiente limpio y seco, y considerar la limpieza adicional si hay precipitados visibles.
- Respetar el tiempo indicado para la lectura de resultados (3 minutos) y evitar interpretaciones después de 10 minutos para evitar errores.
- Contactar al distribuidor local para obtener ayuda si surge alguna dificultad durante la prueba.

MATERIALES INCLUIDOS

- Dispositivo de prueba.
- Instrucciones de uso.

ALMACENAMIENTO

Es fundamental almacenar el test en su bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerada (entre 2-30 °C), evitando la congelación y zonas húmedas, y asegurándose de no utilizar el kit si el envase está dañado o ha expirado la fecha de caducidad impresa.



TEST DE SALUD FEMENINA TEST FSH MENOPAUSIA FORMATO LÁPIZ EN ORINA

INSTRUCCIONES DE USO

Determinar el momento adecuado:

- Si tiene períodos menstruales regulares, realizar la prueba durante los días 2-7 del ciclo menstrual.
- Si no tiene períodos regulares, puede realizar la prueba en cualquier momento.

Preparación:

- Asegurarse de que la prueba, la muestra de orina y/o los controles estén a temperatura ambiente (15-30 °C).
- Abrir el empaque y utilizar la prueba inmediatamente.

Toma de muestra:

- Retirar la tapa del dispositivo y exponer el papel absorbente a la orina durante 10-15 segundos.

Realización de la prueba:

- Colocar la tapa de nuevo en el dispositivo y colocarlo en una superficie estable con la ventana de control hacia arriba.
- Iniciar el temporizador y observar la aparición de una línea en la ventana de control.
- Leer los resultados en 3 minutos. No interpretar después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Dos líneas visibles donde la línea en la zona de prueba (T) es igual o más oscura que la línea en la zona de control (C). Indica niveles elevados de FSH.

Negativo: Dos líneas visibles donde la línea en la zona de prueba (T) es más clara que la línea en la zona de control (C), o no hay línea en la zona de prueba (T). Significa niveles normales de FSH en este momento.

No válido: No aparece la línea de control. Puede ser debido a un volumen insuficiente de muestra o errores en el procedimiento.

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

