

NARCOTEST EN ORINA

COPA CON LLAVE 6 DROGAS + ALCOHOL

El Test Rápido Multidrogas en Copa con llave que detecta 6 Drogas + Alcohol es un dispositivo innovador diseñado para la **detección rápida y precisa de una amplia gama de drogas y sus metabolitos** en muestras de orina. Este producto es una herramienta eficaz para la monitorización y detección de sustancias psicoactivas, medicamentos recetados y otras drogas de abuso.

Su capacidad para detectar múltiples drogas como **anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, opiáceos, ketamina y marihuana**, entre otras, proporciona resultados preliminares analíticos esenciales para la toma de decisiones clínicas.

NIVELES DE CORTE DE CADA SUSTANCIA

Sustancia	Sigla	Nivel de Corte (ng/ml)
COCAÍNA	COC	150
MARIHUANA	THC	50
ANFETAMINAS	AMP	500
OPIÁCEOS	OPI	2.000
METANFETAMINA	MET	500
BENZODIAZEPINAS	BZO	200
ALCOHOL	ALC	0,02%

NIVEL DE CORTE

Los niveles de corte en el Test Rápido de Copa con llave representan los niveles mínimos de una droga en la muestra de orina necesarios para que el test arroje un resultado positivo. Si la concentración de la droga en la muestra es igual o superior al cut-off específico para esa sustancia, el test resultará positivo.

ALMACENAMIENTO

El test debe almacenarse en su bolsa sellada a una temperatura entre 2-30°C, en un lugar fresco y seco, evitando la congelación. Las muestras de orina pueden mantenerse a 2-8°C por hasta 48 horas o congelarse a menos de -20°C para almacenamiento prolongado.




NARCOTEST EN ORINA

COPA CON LLAVE 6 DROGAS + ALCOHOL

RECOMENDACIONES

- El test es solo para uso diagnóstico in vitro y debe permanecer en su bolsa sellada hasta su uso.
- Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y manejarse siguiendo las precauciones para agentes infecciosos.
- El test utilizado debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.
- Se debe evitar congelar el test y no utilizarlo más allá de su fecha de caducidad impresa en la bolsa.
- Seguir las instrucciones de almacenamiento y manipulación del producto para garantizar resultados precisos y fiables.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

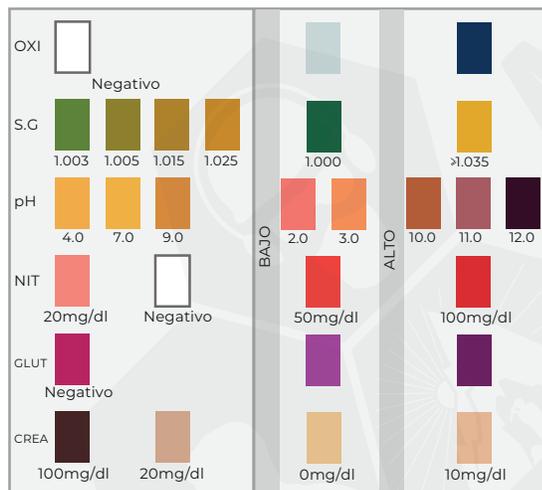

NORMAL

ANORMAL

Uso laboral
Sin manipulación de orina
CONTROL:
DE ADULTERANTE
DE TEMPERATURA
DE PH



CONTROL DE ADULTERANTES

El dispositivo incluye la opción de detectar adulterantes que podrían interferir con los resultados de las pruebas, garantizando así la fiabilidad del diagnóstico. Su facilidad de uso, junto con la rapidez y precisión de los resultados.

NARCOTEST EN ORINA

COPA CON LLAVE 6 DROGAS + ALCOHOL

INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese de que la prueba, la muestra de orina y/o los controles estén a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de comenzar.

1. Saque el frasco de la bolsa sellada y úselo inmediatamente.
2. Recolecte una muestra de orina en un contenedor limpio y seco.
3. Coloque la copa en una superficie plana y asegure la tapa correctamente.
4. Verifique la etiqueta de temperatura (Temp Label) hasta 4 minutos después de la recolección de la muestra. Un color verde indicará la temperatura adecuada de la muestra de orina, que debe estar entre 32-38 °C para ser considerada no adulterada.
5. Escriba la fecha y sus iniciales en el precinto de seguridad, y coloque el sello de seguridad sobre la tapa de la copa.
6. Retire la etiqueta para revelar las tiras de adulteración, si corresponde.
7. Despegue la etiqueta en la tarjeta de la Prueba Rápida Multidroga en Copa para visualizar los resultados.
8. Interprete las tiras de adulteración y las tiras de alcohol entre 3-5 minutos utilizando la carta de colores proporcionada (incluida aparte o dentro de la bolsa de aluminio).
9. Los resultados de las tiras de droga deben interpretarse dentro de los 5 minutos. No interprete los resultados después de 10 minutos.



INTERPRETACIÓN GRÁFICA

