

TEST DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS - VIRALES

TEST DE COVID-19 EN SALIVA CASETE

El Test Rápido de COVID-19 en Saliva es un inmunoensayo cromatográfico diseñado para detectar cualitativamente los antígenos de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de fluido oral de personas sospechosas de estar infectadas.

Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales y deben correlacionarse con el historial clínico y otros datos diagnósticos del paciente. Un resultado positivo no excluye la posibilidad de infecciones bacterianas o coinfecciones con otros virus.

Un resultado negativo no descarta la infección por SARS-CoV-2 y no debe ser la única base para el tratamiento o manejo del paciente. Los resultados negativos deben considerarse junto con las exposiciones recientes del paciente, su historia clínica y la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19. Es necesario confirmar los resultados negativos mediante un ensayo molecular si se requiere para la gestión del paciente.

PRECAUCIONES:

- Lea las instrucciones completas antes de realizar el test para asegurar resultados precisos.
- Uso exclusivo para diagnóstico personal. No usar después de la fecha de vencimiento.
- No coma, beba ni fume en el área de manipulación de muestras y kits.
- No use el test si la bolsa está dañada.
- Trate todas las muestras como potencialmente infecciosas y siga las precauciones microbiológicas.
- Use ropa de protección, guantes desechables y protección ocular al manejar las muestras.
- Lávese bien las manos después de manipular muestras.
- Asegúrese de usar una cantidad adecuada de muestra para el test. Cantidades incorrectas pueden afectar los resultados.
- No utilice muestras de PCR o Medios de Transporte Viral (VTM) para este test.
- Deseche los tests usados según las regulaciones locales.
- Los resultados pueden ser afectados por la humedad y la temperatura.



TEST DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS - VIRALES

TEST DE COVID-19 EN SALIVA CASETE

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:

Almacene el test en su bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). Mantenga el test en su bolsa sellada hasta su uso y no lo congele. No utilice el test después de la fecha de vencimiento indicada en la bolsa.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:


Positivo: Aparecen dos líneas de color, una en la zona de control (C) y otra en la zona de prueba (T), indicando la presencia de antígenos de SARS-CoV-2. La intensidad del color en la zona de prueba (T) puede variar; cualquier intensidad se considera positiva.

Negativo: Aparece una línea de color en la zona de control (C) y ninguna en la zona de prueba (T), indicando la ausencia de antígenos de SARS-CoV-2.

Inválido: No aparece la línea de control, posiblemente debido a un volumen insuficiente de muestra o a un procedimiento incorrecto. Revise y repita el test con un nuevo dispositivo. Si el problema persiste, contacte a su distribuidor local.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO:

El test incluye controles de procedimiento internos. La línea de color en la zona de control (C) confirma el volumen suficiente de la muestra y la correcta técnica de procedimiento. El fondo vacío actúa como control de procedimiento interno negativo.

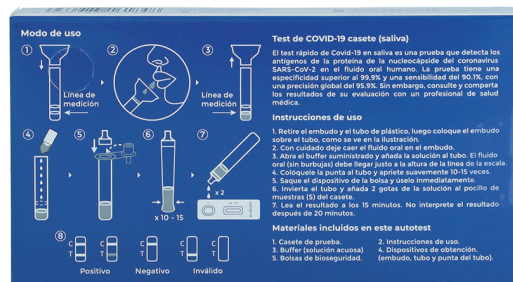

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS

