

TEST DE SALUD FEMENINA

TEST DE EMBARAZO hCG LÁPIZ DIGITAL (ORINA)

El Test de Embarazo Digital HCG es una prueba rápida y fácil de usar para la detección cualitativa de hCG en orina humana. Diseñado para diagnóstico in vitro y autodiagnóstico, proporciona resultados precisos en poco tiempo.

Durante el test, la muestra de orina reacciona con partículas recubiertas de anticuerpos específicos. La mezcla se desplaza hacia arriba en la membrana por acción capilar, reaccionando con los anticuerpos de captura presentes en la membrana y creando una línea de color en la tira de prueba. La señal resultante es convertida en una señal eléctrica por el fotodiodo y luego calculada por el software para ser mostrada en la pantalla LCD.

PRECAUCIONES

La protección del equipo puede verse afectada si no se usa según las instrucciones. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa de aluminio. Para uso en interiores. Utilizar, almacenar y transportar en las siguientes condiciones:

Almacenamiento y transporte: 2-30 °C (35,6 - 86 °F); 90% RH; 86 - 106 kPa

Funcionamiento: 15 - 30 °C (59 - 86 °F); 90% RH; 86 - 106 kPa

No utilizar si la bolsa está rota o dañada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para diagnóstico in vitro. No ingerir. Abra la bolsa de aluminio solo cuando esté listo para usar. Utilizar dentro de una hora tras abrirla. Desechar la prueba usada según la normativa local debido a las pilas. No reutilizar.

Cumple con los requisitos de emisiones e inmunidad. Para evitar interferencias:

- Use este instrumento en un entorno seco, especialmente si hay materiales sintéticos (ropa sintética, alfombras, etc.), ya que las descargas electrostáticas perjudiciales pueden causar resultados erróneos.
- No utilice este instrumento cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa, como teléfonos móviles, ya que pueden interferir en su correcto funcionamiento.



TEST DE SALUD FEMENINA

TEST DE EMBARAZO hCG LÁPIZ DIGITAL (ORINA)

IMPORTANTE

No sostenga la prueba con la punta absorbente hacia arriba durante su realización.

- Paso 1:

Saque la prueba de la bolsa de aluminio y retire la tapa. Sostenga el agarre antideslizante con la punta absorbente apuntando hacia abajo.

- Paso 2:

Vuelva a colocar la tapa y coloque la prueba en una superficie plana con la pantalla de visualización hacia arriba. El símbolo del reloj aparecerá y parpadeará en la pantalla después de aplicar la orina, indicando que la prueba está funcionando.

- Paso 3:

En aproximadamente 3 minutos, el resultado "YES+" o "NO-" aparecerá en la pantalla de visualización.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

- "+" se muestra en la pantalla, indicando que probablemente esté embarazada.
- "-" se muestra en la pantalla, indicando que probablemente no esté embarazada.

El resultado permanecerá en la pantalla durante aproximadamente una hora. Si aparecen otros símbolos en la pantalla, consulte la sección de Errores de la Prueba.

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Prueba de Embarazo Digital hCG.
- Instrucciones de uso.



INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Paso 1



Paso 2



Paso 3

