

## NARCOTEST EN ORINA TEST DE COCAÍNA

El test de droga en orina en casete detecta COC de forma efectiva, identificando concentraciones a partir de 300 ng/mL. Brinda una herramienta confiable para identificar cocaína y compuestos asociados, facilitando su detección.

### PRECAUCIONES

- Uso exclusivo para fines médicos y diagnósticos.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Conservar el test en su bolsa sellada hasta el momento de uso.
- Manipular todas las muestras con precaución, como si fueran potencialmente peligrosas.
- Desechar el test de acuerdo con las regulaciones locales.

Sustancia	Sigla	Nivel de Corte (ng/mL)
COCAÍNA	COC	300


### MATERIALES INCLUIDOS

- Casete de prueba.
- Gotero.
- Instrucciones de uso.

### PRINCIPIO DEL TEST

La prueba rápida COC en casete es un inmunoensayo cromatográfico basado en un principio de competencia entre la benzoilecgonina en la muestra de orina y un conjugado en puntos de unión de anticuerpos.

Si la concentración de benzoilecgonina es inferior a 300 ng/mL, aparece una línea coloreada en la zona de prueba, indicando un resultado negativo. Si supera los 300 ng/mL, no se forma la línea, indicando un resultado positivo. Siempre aparece una línea en la zona de control como verificación del correcto funcionamiento de la prueba.

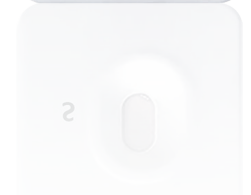

# NARCOTEST EN ORINA TEST DE COCAÍNA


## INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el test, la muestra de orina y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1. Retire el casete de la bolsa sellada y utilícelo inmediatamente.
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada.
3. Mantenga el gotero en posición vertical y transfiera 3 gotas completas de orina (aproximadamente 120 µL) al pocillo de muestra (S).
4. Asegúrese de evitar que queden burbujas de aire en el pocillo de muestra.
5. Una vez que la muestra se ha añadido, inicie el cronómetro.
6. Espere a que aparezcan las líneas de color. Los resultados deben leerse a los 5 minutos. No interprete los resultados después de 10 minutos, ya que pueden no ser válidos.



## INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE USO

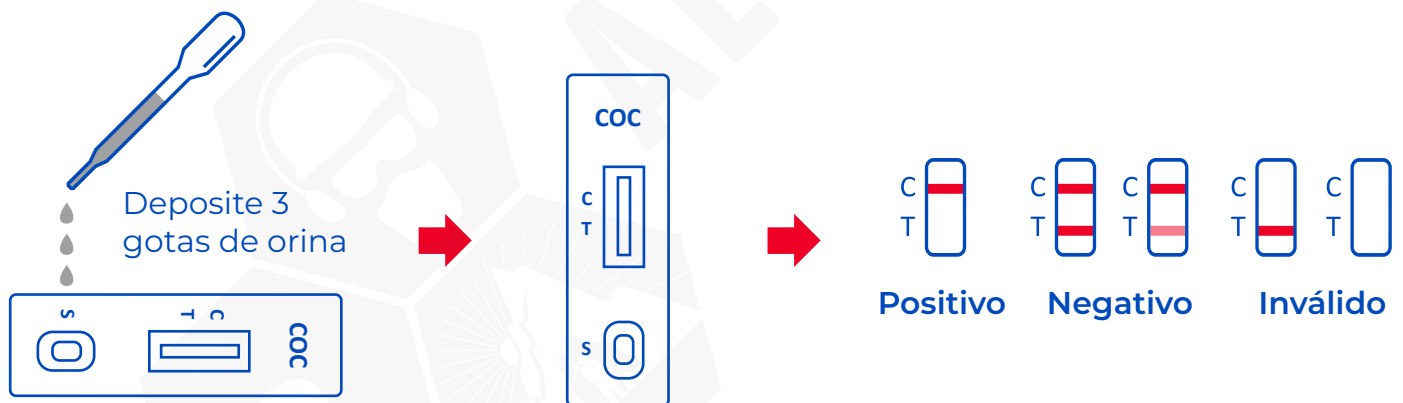

## ALMACENAMIENTO

El test debe almacenarse entre 2°C y 30°C, en su bolsa sellada para protegerlo de la humedad. No debe congelarse y no debe usarse después de la fecha de caducidad. Las muestras de orina se almacenan a 2-8°C por hasta 48 horas, o a -20°C si se requiere más tiempo. Las muestras congeladas deben descongelarse y mezclarse antes del análisis.

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

**Positivo:** Solo una banda en C, sin banda en T, es positivo.

**Negativo:** Una banda en C y T indica resultado negativo.

**Inválido:** Si no hay banda en C, repita con una nueva prueba.