

NARCOTEST EN ORINA TEST DE TRAMADOL

El test rápido de tramadol en casete es un dispositivo de diagnóstico in vitro diseñado para la detección cualitativa de tramadol en muestras de orina humana. Este inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva permite identificar la presencia de tramadol y sus metabolitos en la orina, proporcionando resultados rápidos y fáciles de interpretar.

Sustancia	Sigla	Nivel de Corte (ng/mL)
TRAMADOL	TML	100

PRINCIPIO DEL TEST

Este test utiliza un inmunoensayo competitivo para detectar tramadol en orina. La muestra migra por capilaridad; si el tramadol está por debajo de 100 ng/mL, se formará una línea en la región de prueba (T). Una línea en la región de control (C) confirma que el test se realizó correctamente. Este método permite resultados rápidos y confiables en entornos clínicos.

MATERIALES INCLUIDOS

- Casete de prueba.
- Gotero.
- Instrucciones de uso.

CARACTERÍSTICAS

- **Detección rápida:** La prueba ofrece resultados en tan solo 5 minutos, lo que permite una evaluación rápida en entornos clínicos.
- **Fácil de usar:** El procedimiento es sencillo y no requiere equipo especializado. Solo se necesita un gotero para transferir la muestra de orina al casete de prueba.
- **Control de calidad interno:** Incluye un control de procedimiento que asegura la validez de la prueba, mostrando una línea de control (C) que indica que se ha realizado correctamente.
- **Precauciones de uso:** Diseñada para uso médico, la prueba debe manejarse con cuidado y seguir las instrucciones para garantizar resultados precisos.



NARCOTEST EN ORINA TEST DE TRAMADOL


INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el test, la muestra de orina y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1. Retire el casete de la bolsa sellada y utilícelo inmediatamente.
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada.
3. Mantenga el gotero en posición vertical y transfiera 3 gotas completas de orina (aproximadamente 120 µL) al pocillo de muestra (S).
4. Asegúrese de evitar que queden burbujas de aire en el pocillo de muestra.
5. Una vez que la muestra se ha añadido, inicie el cronómetro.
6. Espere a que aparezcan las líneas de color. Los resultados deben leerse a los 5 minutos. No interprete los resultados después de 10 minutos, ya que pueden no ser válidos.



INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE USO

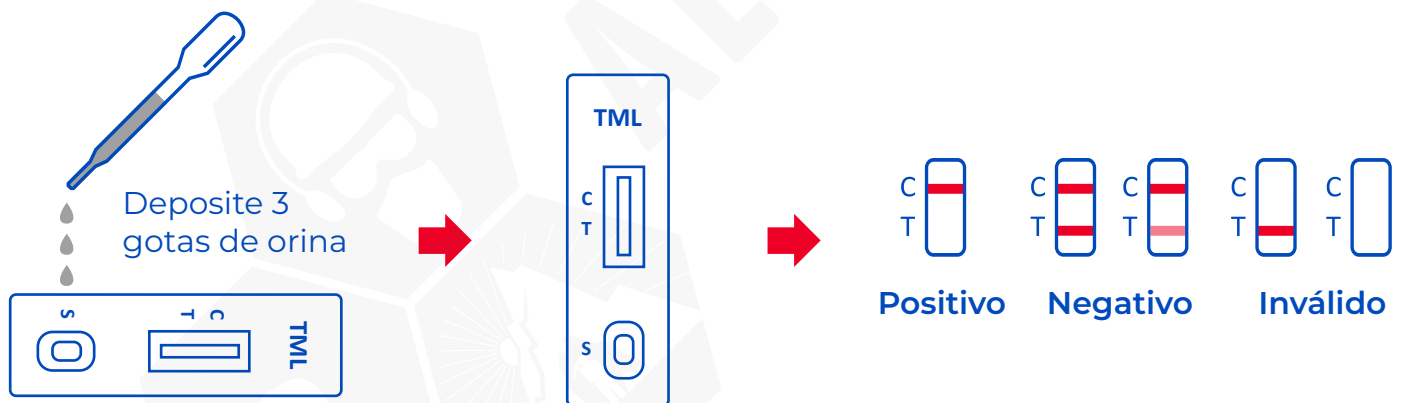

ALMACENAMIENTO

La prueba debe almacenarse en su bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C) y no debe congelarse. Es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase.

El test rápido en casete de TML es una herramienta eficaz para la detección de tramadol, ideal para laboratorios, clínicas y entornos de atención médica donde se requiera un diagnóstico rápido y confiable.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: Solo una banda en C, sin banda en T, es positivo.

Negativo: Una banda en C y T indica resultado negativo.

Inválido: Si no hay banda en C, repita con una nueva prueba.