

## TEST DE ENFERMEDADES TEST DE METAPNEUMOVIRUS (HMPV)

El test rápido de HMPV es un inmunoensayo cromatográfico desarrollado para la detección cualitativa de antígenos del **Metapneumovirus Humano (HMPV)** en muestras obtenidas mediante hisopado nasofaríngeo. Este dispositivo de diagnóstico in vitro está diseñado exclusivamente para uso profesional, proporcionando una herramienta confiable y eficiente para el diagnóstico temprano de infecciones respiratorias asociadas al HMPV.

### CARACTERÍSTICAS

- **Detección rápida y eficaz:** Permite obtener resultados en tan solo 15 minutos, facilitando una respuesta rápida en entornos clínicos.
- **Uso sencillo:** La prueba incluye instrucciones claras y un procedimiento fácil de seguir, lo que la hace accesible para profesionales de la salud.
- **Control de calidad interno:** Incorpora un control de procedimiento que asegura la validez de la prueba, garantizando que se ha utilizado un volumen adecuado de muestra y que la técnica de procedimiento es correcta.
- **Almacenamiento y estabilidad:** La prueba es estable hasta la fecha de caducidad indicada y puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerada, sin necesidad de congelación.

### INDICACIONES DE USO

La Prueba Rápida HMPV es ideal para la detección de antígenos en pacientes con síntomas de infecciones respiratorias, especialmente en poblaciones vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.



### MATERIALES INCLUIDOS

- 25 casetes de prueba.
- Instrucciones de uso.
- Hisopo estéril.
- Tarjeta de procedimiento.
- Solución buffer.
- Estación de trabajo
- Tubos y puntas de extracción.


# TEST DE ENFERMEDADES TEST DE METAPNEUMOVIRUS (HMPV)

## INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese de tener todos los materiales proporcionados listos y a mano y lávese las manos y utilice guantes desechables para garantizar la higiene.

1. Inserte un hisopo estéril en la fosa nasal del paciente, alcanzando la superficie de la nasofaringe posterior.
2. Frote la superficie de la nasofaringe posterior de 5 a 10 veces para recolectar adecuadamente la muestra.
3. Retire el hisopo estéril de la cavidad nasal, evitando el exceso de volumen y la secreción nasofaríngea muy viscosa.
4. Coloque el hisopo en un tubo de extracción que contenga la solución de extracción.
5. Agite el hisopo en la solución durante unos segundos para liberar los antígenos.
6. Tome el casete de prueba y aplique el volumen adecuado de la solución de muestra en la zona designada del casete.
7. Espere el tiempo indicado en el prospecto (generalmente 15 minutos) para que la prueba se desarrolle.

## INTERPRETACIÓN GRÁFICA

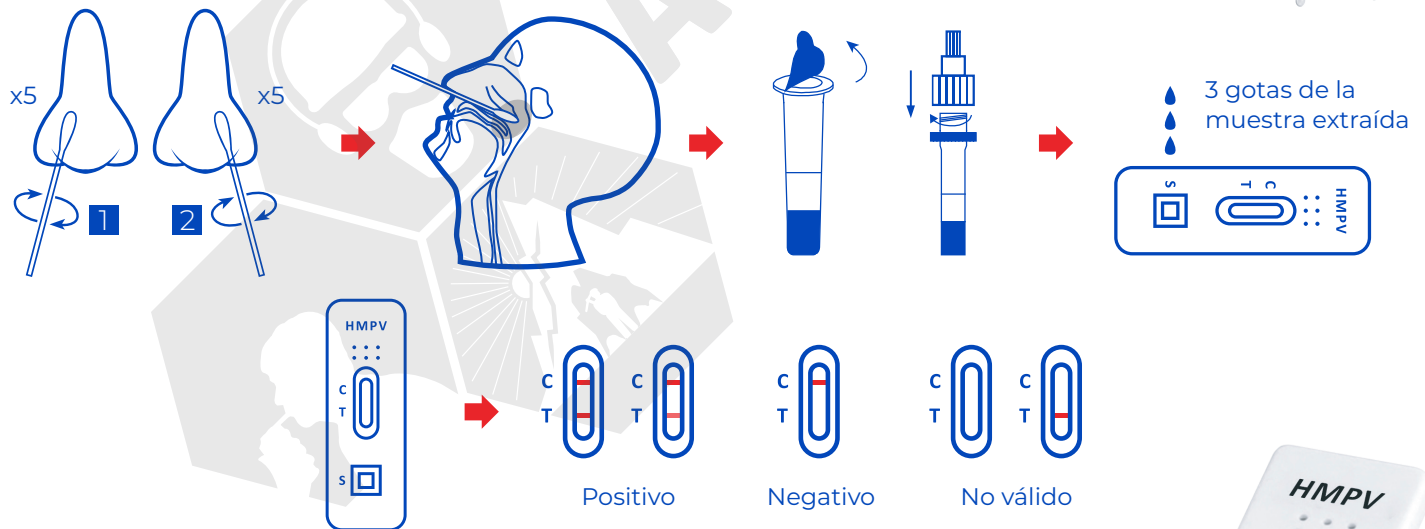

## INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

- **Línea de Control (C):** Siempre debe aparecer para indicar que la prueba se ha realizado correctamente.
- **Línea de Prueba (T):** Si aparece, indica un resultado positivo para la presencia de antígenos de HMPV.
- Si no aparece ninguna línea en la región de prueba, el resultado es negativo.

