

# TEST RÁPIDO CASSETTE CRYPTOCOCCUS

El Casete de prueba rápida de antígeno de Cryptococcus (Sangre Completa/Suero/Plasma/Líquido cefalorraquídeo (CSF)) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno polisacárido capsular del complejo Cryptococcus (Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii) en sangre entera humana, suero, plasma o líquido cefalorraquídeo (CSF) para contribuir en el diagnóstico de criptococosis.


## Almacenamiento

Almacene el producto en el empaque sellado a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C).



La prueba debe permanecer en el empaque sellado hasta su uso.

## Instrucciones de uso

- El empaque debe estar a temperatura ambiente antes de abrirlo.
- Coloque el Cassette para las muestras de suero, plasma o CSF
- Para muestras de sangre completa por punción capilar

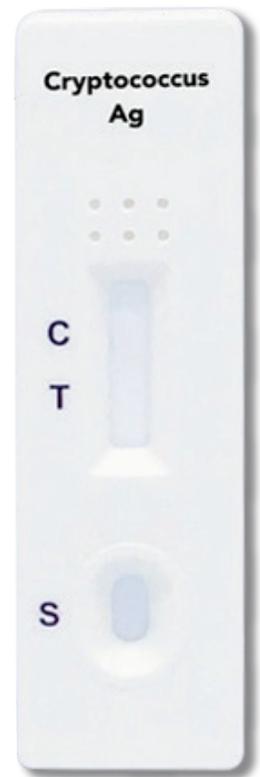

## INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE USO

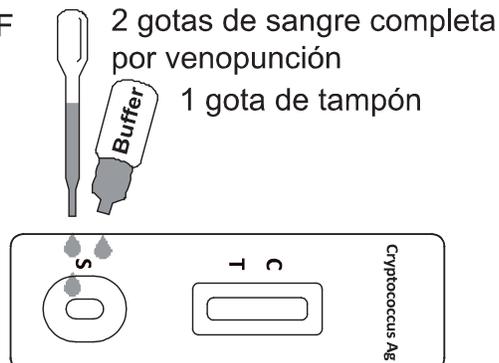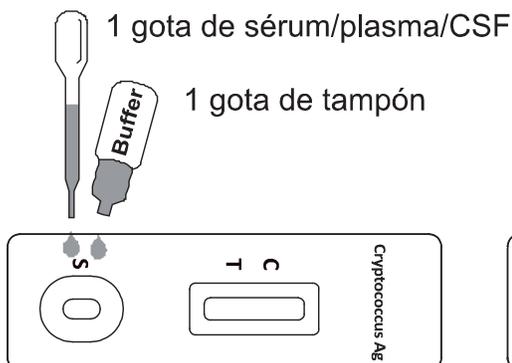

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

**POSITIVO:** Aparecen dos líneas de colores. Una línea de color debe aparecer en el área de control (C) y la otra línea de color debe aparecer en el área de prueba (T).



**NEGATIVO:** Aparece una línea de color en el área de control (C). Ninguna línea de color aparece en el área de prueba (T).



**INVÁLIDO:** No aparece la línea de control. Las razones más probables para que falle la línea de control son un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto de las técnicas. Revise el procedimiento y repita la prueba con una prueba nueva. Si el problema continua, discontinúe el uso del kit de prueba de inmediato y comuníquese con su distribuidor local.



### INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS

