



NARCOTEST TEST DE DROGAS EN PELO

El casete de prueba rápida para la detección de sustancias en muestras de pelo humano es un inmunoensayo cromatográfico ágil para identificar cualitativamente diversas drogas y metabolitos. Su capacidad de detección se sitúa en un nivel de corte de 0.2 ng/mg. Es crucial tener en cuenta que este casete proporciona resultados preliminares. Para confirmar estos resultados, se recomienda emplear métodos químicos más específicos, como la cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS), junto con la evaluación profesional y clínica al interpretar los resultados. Este enfoque integral garantiza una evaluación precisa y exhaustiva de las muestras.

La detección capilar presenta ventajas únicas en las pruebas de drogas, ofreciendo información sobre el consumo a largo plazo que otras muestras biológicas no brindan, como la sangre o la orina. La toma de muestras de pelo es fácil, su transporte y almacenamiento resultan sencillos a lo largo del tiempo. El lento metabolismo de las drogas en el cabello proporciona condiciones óptimas para el análisis. Se estima que el periodo de detección abarca aproximadamente 90 días, aunque puede variar según las circunstancias individuales, incluyendo la longitud del cabello y la frecuencia de consumo de la droga. Este enfoque integral optimiza la precisión en los resultados.

Proceso de Análisis Capilar

Durante el análisis, el lisado descompone la queratina, liberando moléculas de drogas para su análisis. El lisado migra por acción capilar, y si la droga está presente por debajo de la concentración de corte, se forma una línea de color en la región de prueba. Si la droga está por encima de esta concentración, no aparece la línea. Una muestra positiva no genera la línea debido a la competencia de drogas, mientras que una muestra negativa sí muestra la línea. La línea de control siempre aparece, indicando un procedimiento correcto.

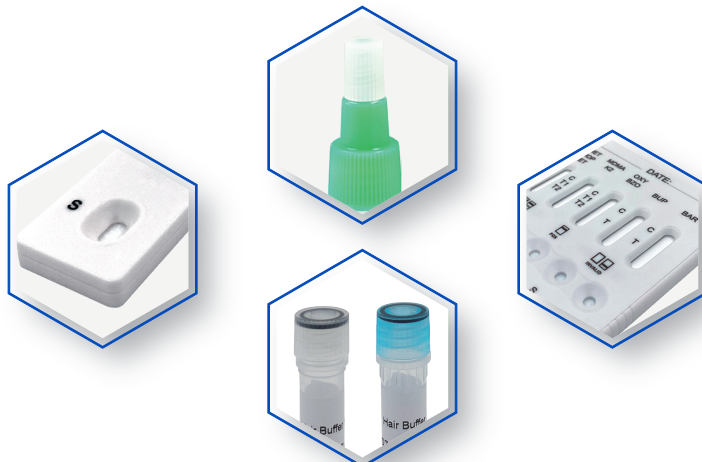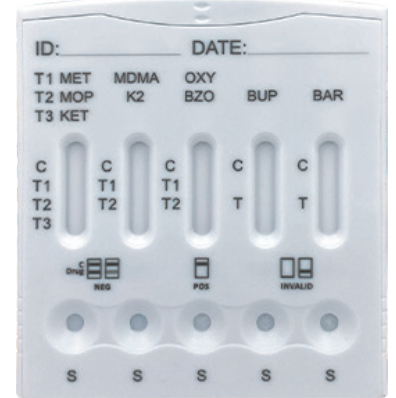

NARCOTEST TEST DE DROGAS EN PELO

PRECAUCIONES

- Solo para uso médico y diagnóstico in vitro profesional. No usar después de la fecha de caducidad.
- Mantener la prueba en el empaque sellado hasta su uso.
- Manipular todas las muestras como potencialmente peligrosas siguiendo las pautas de agentes infecciosos.
- Desechar las pruebas usadas según las regulaciones locales.



ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente o en refrigeración (2-30°C) dentro del empaque sellado. La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el empaque sellado. Mantener en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No usar después de la fecha de caducidad.

El Polvo Catalizador puede almacenarse a 2-30°C hasta 18 meses antes de la prueba. Aunque el kit es estable hasta 30°C, se recomienda almacenar el Polvo Catalizador a 2-8°C para un mejor rendimiento.




INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE USO



Paso 1



Paso 2

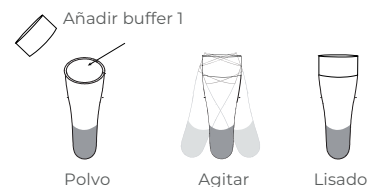

Paso 3

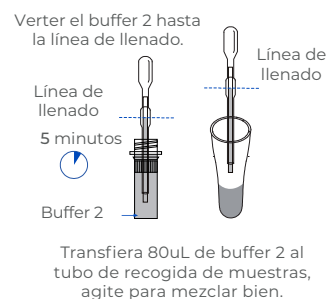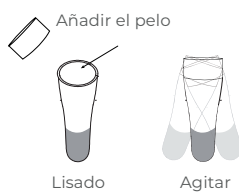

Paso 4

2 gotas completas de la muestra en el pozo (S) de la muestra.



CONFIGURACIÓN DE CASETES


Casete una droga

| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|----------------|-------|------------------------|
| Anfetamina | AMP | 0,2 |
| Cocaína | COC | 0,5 |
| Benzodiazepina | BZO | 0,2 |
| Morfina | MOP | 0,2 |
| Éxtasis | MDMA | 0,2 |
| Ketamina | KET | 0,2 |




Casete 5 drogas

| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|---------------|-------|------------------------|
| Metanfetamina | MET | 0,2 |
| Morfina | MOP | 0,2 |
| Cocaína | COC | 0,5 |
| Cotina | COT | 0,2 |
| Ketamina | KET | 0,2 |

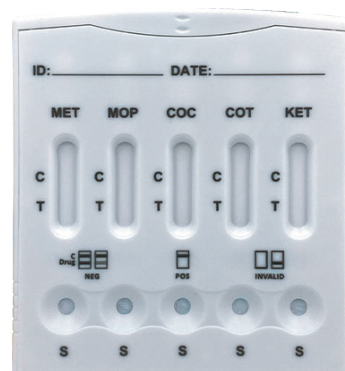

Casete 5 drogas


| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|-------------------|-------|------------------------|
| Fentalino | FLY | 0,2 |
| Cotina | COT | 0,2 |
| Cocaína | COC | 0,5 |
| Anfetamina | AMP | 0,2 |
| 6-Monoacilmorfina | 6-MAM | 0,2 |

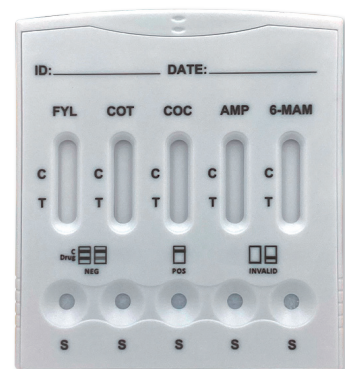

CONFIGURACIÓN DE CASETES


Casete 5 drogas

| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|-----------------|-------|------------------------|
| Oxicodona | OXY | 0,2 |
| Buprenorfina | BUP | 0,2 |
| Barbitúricos | BAR | 0,2 |
| Anfetamina | AMP | 0,2 |
| Benzodiacepinas | BZO | 0,2 |

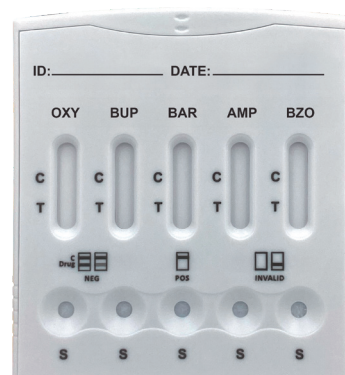


Casete 6 drogas

| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|-----------------|-------|------------------------|
| Éxtasis | MDMA | 0,2 |
| Cocaína | COC | 0,5 |
| Opiáceos | OPI | 0,2 |
| Ketamina | KET | 0,2 |
| Anfetamina | AMP | 0,2 |
| Benzodiacepinas | BZO | 0,2 |

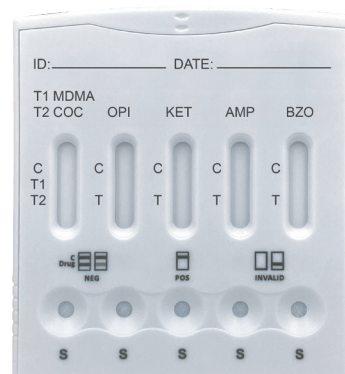

Casete 9 drogas

| SUSTANCIA | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|--------------------------|-------|------------------------|
| Metanfetamina | MET | 0,2 |
| Morfina | MOP | 0,2 |
| Ketamina | KET | 0,2 |
| Éxtasis | MDMA | 0,2 |
| Cannabinoides sintéticos | K2 | 0,2 |
| Oxicodona | OXY | 0,2 |
| Benzodiazepina | BZO | 0,2 |
| Buprenorfina | BUP | 0,2 |
| Barbitúricos | BAR | 0,2 |

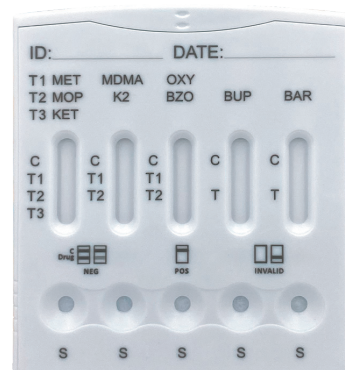

TABLAS DE DROGAS PARA CONFIGURACIONES

Si necesita o desea otra configuración con otras opciones, lo invitamos a consultar nuestra tabla de opciones adicionales para encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.

| SUSTANCIAS | SIGLA | NIVEL DE CORTE (ng/ml) |
|---------------------------|-------|------------------------|
| 6-Monoacetylmorfina | 6-MAM | 0,2 |
| AB-PINACA | ABP | 0,2 |
| Anfetamina | AMP | 0,2 |
| Barbitúricos | BAR | 0,2 |
| Benzodiacepinas | BZO | 0,2 |
| Buprenorfina | BUP | 0,2 |
| Cocaína | COC | 0,5 |
| Cotinina | COT | 0,2 |
| Fenciclidina | PCP | 0,2 |
| Fentanil | FYL | 0,2 |
| Ketamina | KET | 0,2 |
| Marihuana | THC | 0,2 |
| Marihuana sintética | K2 | 0,2 |
| Metanfetamina | MET | 0,2 |
| Metilendioximetanfetamina | MDMA | 0,2 |
| Morfina | MOP | 0,2 |
| Oxicodona | OXY | 0,2 |

