

TEST DE PANEL 10 DROGAS EN ORINA

El Test Rápido Multidrogas en Panel es un método fácil y seguro para detectar drogas en orina, con resultados confiables y una ventana de detección de 7 a 30 días. Detecta hasta 10 drogas, ideal para entornos clínicos, laborales o en el hogar.

El test de drogas en formato panel es una herramienta versátil que, mediante su formato individual, destaca por su rapidez y facilidad de interpretación. Ofrece una cobertura integral al detectar **benzodiazepinas, metanfetaminas, escopolaminas, anfetaminas, marihuana, ketamina, opiáceos, alcohol, cocaína y éxtasis**.

Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml
COCAINA	COC	300
MARIHUANA	THC	50
ANFETAMINAS	AMP	1.000
BENZODIAZEPINAS	BZO	300
OPIÁCEOS	OPI	2.000
METANFETAMINAS	MET	1.000
KETAMINA	KET	1.000
ESCOPOLAMINA	SCOP	500
ÉXTASIS	MDMA	500
ALCOHOL	ALC	0,02%



Nota: Es importante recordar que estos son solo estimados generales y que el tiempo de detección puede variar en cada individuo. Si se requiere una detección precisa y específica, se recomienda consultar con un profesional de la salud o un laboratorio especializado.




TEST DE PANEL 10 DROGAS EN ORINA

INSTRUCCIONES

1. Llevar la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Sacar el test en panel de su bolsa y utilizarlo inmediatamente.
2. Abrir el panel.
3. Con las flechas señalando la muestra de orina, sumergir el panel verticalmente en la muestra de orina durante 10 a 15 segundos. Sumergir las tiras hasta el nivel de las líneas gruesas, pero no por encima de la flecha en el panel de ensayo.
4. Colocar la tapa del panel y dejar el panel en una superficie plana no absorbente.
5. Poner el reloj en marcha y esperar a la aparición de las líneas coloreadas.
6. El resultado debe ser interpretado a los 5 minutos. No interpretar el resultado pasado 10 minutos.

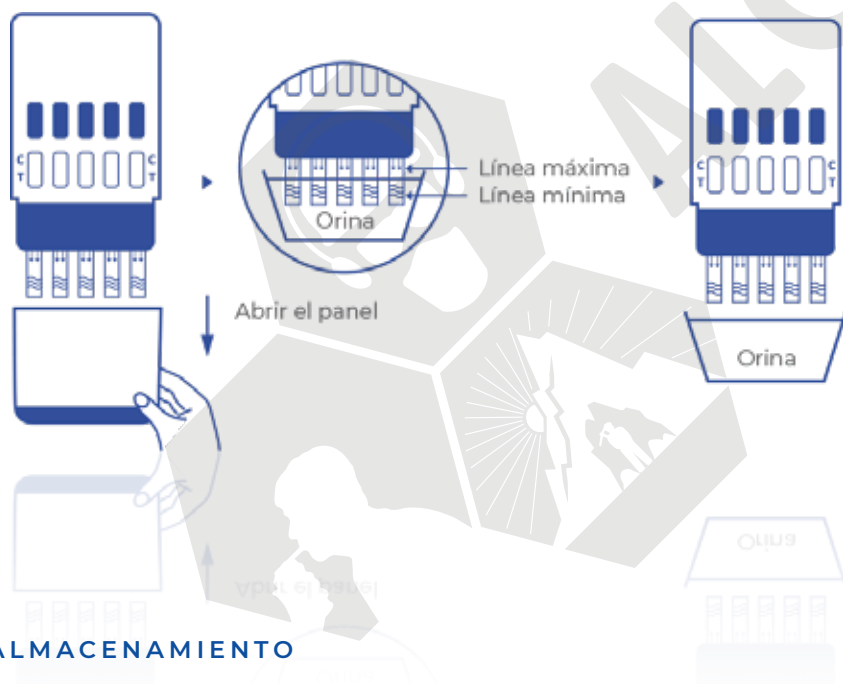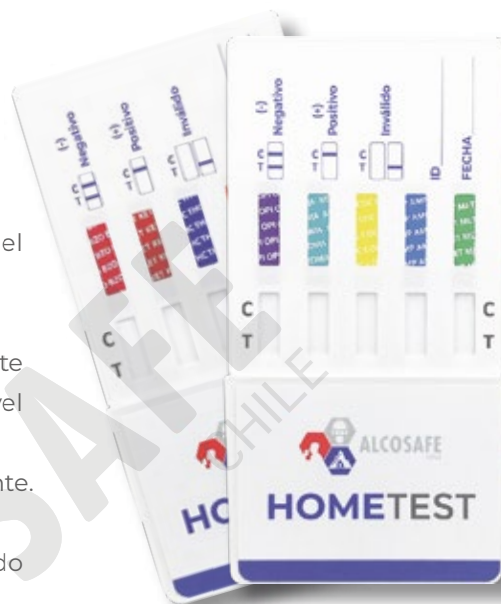

Lea las tiras de alcohol entre 3 y 5 minutos con ayuda de la tarjeta de color proporcionada.

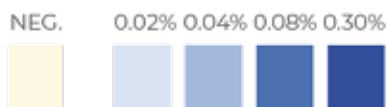

ALMACENAMIENTO

Almacenar empaquetados en su bolsa sellada a 2-30°C. El test es estable hasta su fecha de caducidad impresa en la bolsa. El test en panel debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de su uso. **NO CONGELAR.** No usar más allá de su fecha de caducidad.

Las muestras de orina pueden almacenarse a 2-8°C hasta 48 horas antes de su análisis. Para almacenamiento más prolongado, las muestras pueden congelarse por debajo de -20°C. Las muestras congeladas deben descongelarse y mezclarse bien antes de su análisis.

TEST DE PANEL 10 DROGAS EN ORINA

INSTRUCCIONES

NEGATIVO: Aparecen líneas de color en la región de Control (C) y en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga particular analizada en la muestra de orina está por debajo del valor del cut-off para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Solo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T). El resultado positivo indica que la concentración de la droga en la muestra de orina es superior al valor del cut-off específico de esa droga.



INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Leer las instrucciones de nuevo y repetir la prueba empleando un nuevo test. Si el resultado continúa siendo inválido, contactar con el fabricante.

