



ACCESORIO KETOSCAN MULTIGENIX CARTUCHO DE ALCOHOL MÓDULO DE SENSOR

El **módulo de sensor de alcohol** desempeña un papel fundamental al detectar y cuantificar con precisión la presencia de alcohol en el aliento. El módulo va en el dispositivo de control de cetosis y alcohol **Multigenix** de **KETOSCAN**.

El sensor está meticulosamente calibrado y puede ser reemplazado con facilidad siguiendo las instrucciones suministradas, garantizando así la constancia en la exactitud de las mediciones sin requerir ajustes externos adicionales.

REEMPLAZO DEL MÓDULO

1. Asegúrese de tener un módulo de sensor precalibrado de repuesto disponible.
2. Apague el dispositivo y retire cualquier boquilla desechable utilizada.
3. Con cuidado, retire el módulo de sensor antiguo tirando suavemente para separarlo del cuerpo del analizador.
4. Tome el nuevo módulo de sensor precalibrado y alinee correctamente los conectores para insertarlo en el lugar adecuado en el analizador.
5. Presione suavemente el nuevo módulo de sensor hasta que encaje de forma segura en su lugar.
6. Encienda el analizador de aliento y verifique que el nuevo módulo de sensor esté correctamente instalado.

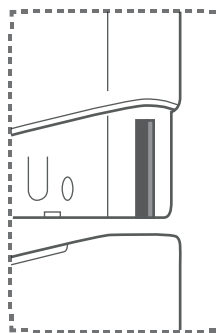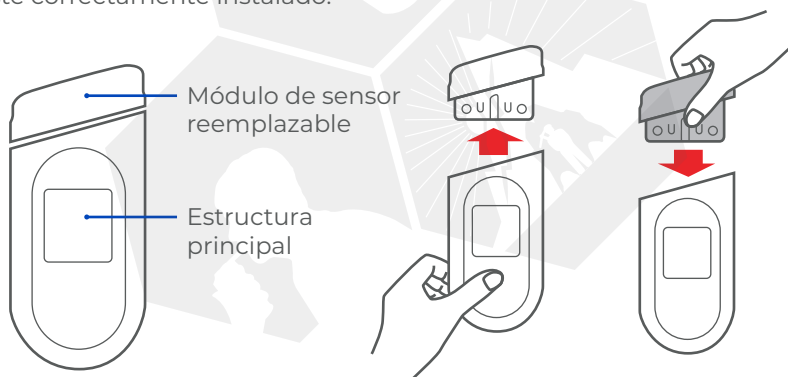

Nota: Alinee el carril del lado derecho e inserte el módulo

FUNCIONAMIENTO

1. Inserte una boquilla desechable.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido por 2 segundos.
3. Realice la "prueba de acondicionamiento del sensor" esperando la cuenta regresiva de 10 segundos y soplando en el dispositivo para eliminar residuos. Una vez que aparezca "OK", proceda a la "Prueba principal" después de otra cuenta regresiva de 10 segundos.

MULTIGENIX

SKU: 20204



KETOSCAN
DISPONIBLE



ACCESORIO KETOSCAN MULTIGENIX CARTUCHO DE ALCOHOL MÓDULO DE SENSOR

ESPECIFICACIONES

Tipo de sensor:	Sensor de gas de alcohol de alta resolución.
Tiempo de análisis:	4 segundos.
Boquilla:	Suministrada desechable.
Ciclo de reemplazo del módulo del sensor:	300 mediciones o pasado el año de uso.
T° de almacenamiento:	5°C - 50°C
T° de funcionamiento:	10°C - 40°C
Unidad de medida y rango	Unidad de medida / rango de medida g/L 0.00 - 4.00 ‰ 0.00 - 4.00 %BAC 0.00 - 0.40 mg/L 0.00 - 2.00 mg/100mL 0 - 400 ug/L 0 - 2500 ug/100mL 0 - 2500
Precisión:	+/-0.01 %BAC a 0.05 %BAC

SINCRONIZACIÓN CON LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación KETOSCAN de Google Play para Android o App Store para IOS.
2. Encienda el Bluetooth y la ubicación o GPS del teléfono móvil.
3. Mientras el dispositivo Multigenix esté encendido, abra la aplicación en su dispositivo móvil, presione "Emparejar con KETOSCAN", y seleccione su dispositivo de la lista.
4. Ingrese la información requerida y comience el proceso de prueba.



MULTIGENIX

SKU: 20204

