

TEST DE DROGA EN SALIVA TEST DE 7 DROGAS - UNOW

El dispositivo de detección de drogas en fluidos orales **Unow** es un inmunoensayo rápido de un solo paso que permite la detección cualitativa de diversas sustancias como **Anfetamina, Benzodiazepinas, Cocaína, Metanfetamina, Opiáceos, Marihuana y Oxycodona** en muestras de fluido oral humano.



Con concentraciones de corte específicas para cada droga, este dispositivo proporciona resultados preliminares en tan solo unos minutos. Herramienta útil para el monitoreo de drogas en entornos forenses y de salud.

NIVELES DE CORTE DE CADA SUSTANCIA

Sustancia	Sigla	Nivel de Corte ng/ml
COCAÍNA	COC	50
MARIHUANA	THC	25
ANFETAMINAS	AMP	50
OXICODONA	OXY	40
OPIÁCEOS	OPI	50
BENZODIAZEPINAS	BZO	50
METANFETAMINA	MET	50

RECOMENDACIONES

- Seguir las instrucciones de recogida de muestra con el donante, asegurando que no coma, beba, fume ni mastique productos del tabaco al menos 10 minutos antes.
- No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
- Almacenar el dispositivo entre 4°C-30°C, evitando la luz solar directa, la humedad y el calor.
- Limpia la mejilla y la encía con la lengua antes de recoger la muestra de saliva.
- Presionar el dispositivo hasta que haga doble clic para bloquearlo correctamente.
- Aplastar completamente el blíster de reactivo para iniciar el ensayo.
- Se recomienda confirmar los resultados positivos preliminares con métodos más específicos.

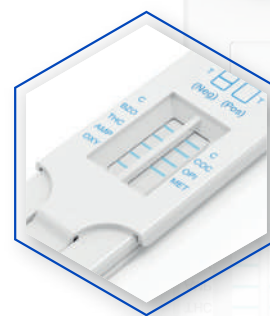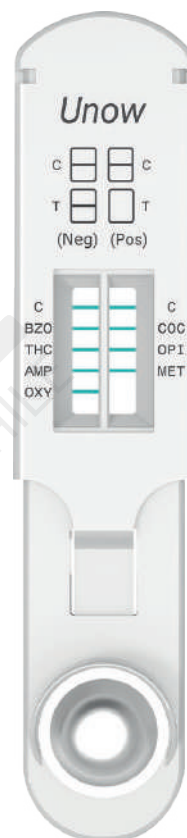


TEST DE DROGA EN SALIVA TEST DE 7 DROGAS - UNOW

INSTRUCCIONES DE USO


1. Permita que el dispositivo alcance la temperatura ambiente (15-30°C).
2. Extraiga el dispositivo de la bolsa sellada junto con la almohadilla y úselo inmediatamente.
3. Recolecte saliva acumulándola en la lengua y luego utilice la punta de la almohadilla para recoger aproximadamente 80 µL de saliva.
4. Inserte la almohadilla de recogida en el dispositivo y presione hasta que haga doble clic para bloquearla en su lugar.
5. Coloque el dispositivo en una superficie plana y aplaste completamente el blíster de reactivo para iniciar el ensayo.
6. Observe los resultados en un período de 5-10 minutos y evite interpretarlos después de 15 minutos.




INTERPRETACIÓN GRÁFICA

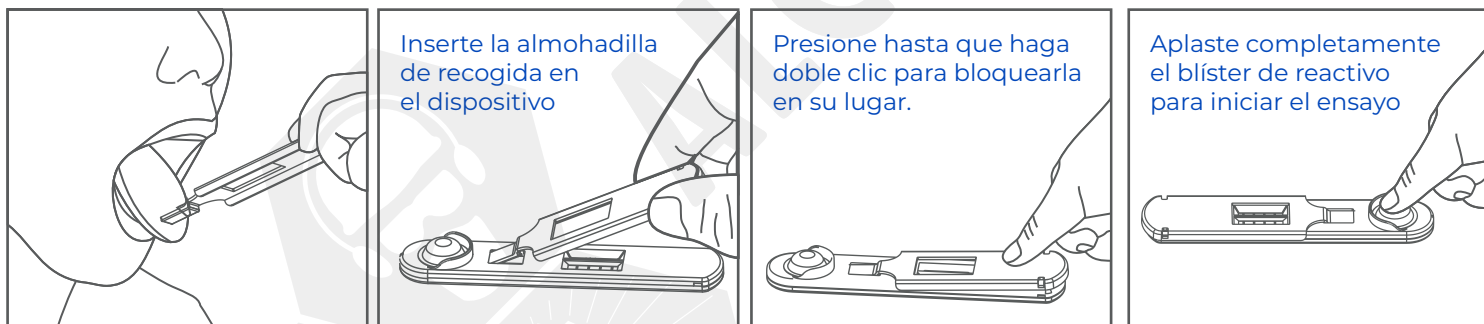


5-10 Minutos

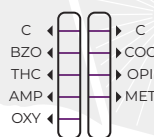

Negativo

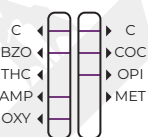

Positivo
THC y MET

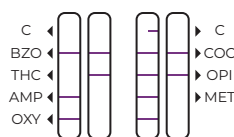

No válido

ALMACENAMIENTO

El dispositivo de detección de drogas en saliva, debe almacenarse entre 4°C-30°C, protegido de la luz solar directa y la humedad, en su bolsa sellada original hasta su uso, cumpliendo con la fecha de caducidad indicada. Estas medidas garantizan la integridad y eficacia del dispositivo para obtener resultados precisos en la detección de sustancias en muestras de saliva.

