

TEST DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS-VIRALES

TEST DE COVID-19/INFLUENZA A+B

RSV/ADENOVIRUS

SKU: 30157

La Prueba Rápida Combinada de Antígenos para SARS-CoV-2, Influenza A+B, RSV (virus sincitial respiratorio) y Adenovirus es un **inmunoensayo cromatográfico diseñado para la detección cualitativa de antígenos virales en muestras de hisopo nasofaríngeo**.

Identifica proteínas específicas de estos virus en pacientes con sospecha de infección respiratoria, siendo útil para el diagnóstico rápido y la toma de decisiones clínicas en entornos médicos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Resultados rápidos.
- Fácil interpretación visual.
- Diagnóstico rápido de infecciones respiratorias.
- Operación simple, no se requiere equipo.
- Detecta múltiples antígenos en una prueba.
- Alta precisión.

ALMACENAMIENTO

Para preservar la integridad y eficacia del producto, es importante almacenarlo en su empaque sellado a temperatura ambiente o refrigerado, entre 2 y 30°C. Además, la prueba debe permanecer en el empaque sellado hasta el momento de su uso, garantizando así su óptimo funcionamiento.



MATERIALES INCLUIDOS

- 20 Casetes de prueba
- Instrucciones de uso
- Hisopos estériles
- Solución Buffer
- Tubos y puntas de extracción
- Estación de trabajo
- Tarjeta de procedimiento.



TEST DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS-VIRALES

TEST DE COVID-19/INFLUENZA A+B

RSV/ADENOVIRUS

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Muestra:

- Use el hisopo y la solución buffer proporcionados para recolectar y preparar la muestra.
- Coloque el hisopo en el tubo de extracción, exprima para liberar los antígenos y deseche el hisopo.

Proceso de Testeo:

- Saque el casete de prueba del empaque y agregue la muestra a los pocillos designados.
- Siga las instrucciones de la tarjeta de procedimiento y espere el tiempo especificado.

Interpretación de Resultados:

- Observe la aparición de líneas de color en las zonas de testeo para resultados positivos/negativos.
- La línea de control confirma la validez del test.

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

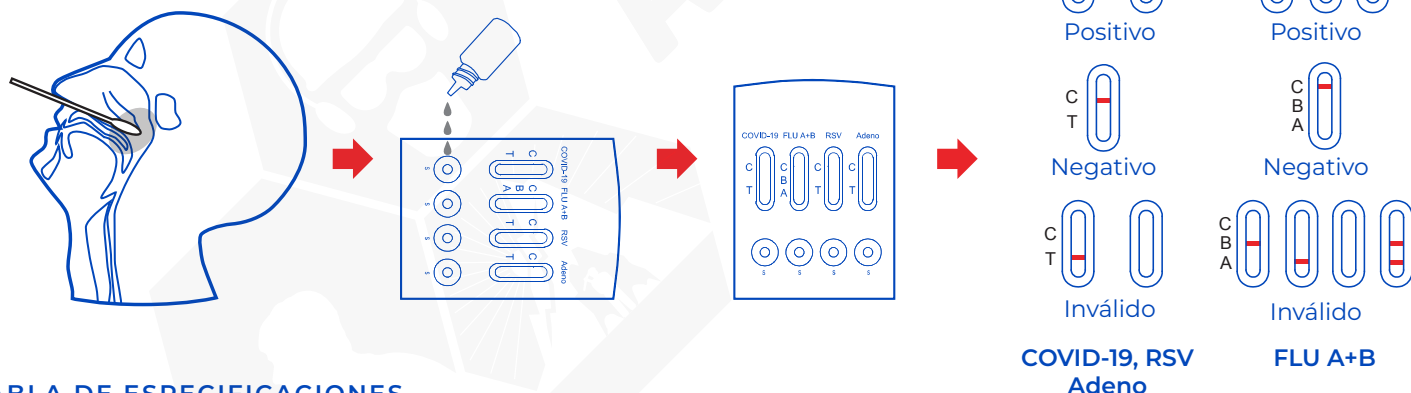


TABLA DE ESPECIFICACIONES

Antígenos	Sensibilidad	Exactitud	Especificidad
COVID-19	96,4 %	98,2 %	99,0 %
INFLUENZA A	95 %	98,4 %	99,1 %
INFLUENZA B	92,9 %	98,1 %	99,1 %
RSV (virus sincitial respiratorio)	94,3 %	95,9 %	96,2 %
ADENOVIRUS	96,9 %	98,4 %	98,6 %

